

SINOAOO MEDICAL CORP.

ADD:Room 1310,Building 1,Window of Green Space Business Plaza,Jinyuan Road 2

Dong Shan Street, Nanjing, China, P.C. 211100

www.aogrand.comwww.sinoaomed.com



[Produkt] jednorázové nitrilové rukavice

[Účel použití] Rukavice jsou vhodné do prostředí s prací s tělními tekutinami, mikroorganismy a chemikáliemi. Neobsahují latex a jsou proto výbornou alternativou pro osoby citlivé na alergii s typem I. Absence pudru poskytuje velkou flexibilitu, přilnavost a chemickou rezistenci.

[návod k použití]

Nasazení: Před použitím zkontrolujte neporušenost balení, nepoužívejte poškozené rukavice. Rukavice jsou jednorázové a oboustranné. Před nasazením si sejměte veškeré šperky z rukou a zápěstí a umyjte si ruce. Vyberte vhodnou velikost rukavic pro vás. Položte rukavice na připravenou pracovní plochu. Nasadte rukavici na svou dominantní ruku tak, že rukavici uchopíte druhou rukou, přičemž pamatujte na to, abyste se dotýkali pouze vnitřku rukavice a navlékněte si ji na dominantní ruku, dokud nedosáhnete úrovně prstů. Použijte dominantní ruku v rukavici, abyste navlékli druhou rukavici na nedominantní ruku. Jakmile jsou obě rukavice navlečené, můžete se dotýkat vnější strany rukavic, abyste si upravili jejich správné nasazení.

Sundání:

Pomocí dominantní ruky začněte uchopením vnější části rukavice na nedominantní ruce na straně dlaně poblíž manžety. Stáhněte rukavici z nedominantní ruky, uchopte ji do ruky v rukavici a zmačkejte ji.

Vsuňte dva prsty pod manžetu rukavice na druhé ruce a opatrně ji odtáhněte od ruky, aniž byste se dotkli zápěstí. Tuto rukavici stahujte tak, aby se obrátila naruby a přitom do ní zabalte první rukavici.

Rukavice odhodte do určeného odpadu.

[Skladování] Skladujte na chladném tmavém místě, v suchu, bez působení korozivních plynů. Teplota pro skladování 10°C - 37°C.

Životnost: 5 let. Spotřebujte do data uvedeného na obalu výrobku. Rukavice neobsahují žádné látky, o nichž by bylo známo, že způsobují alergie.

Dovozce a distributor: PATRIX s.r.o., Učňovská 378/4, 190 00 Praha 9, info@topline-global.eu, tel: +420 607 033 009

velikost	minim. délka (mm)	šířka dlaně (mm)	váha (g)	tloušťka dlaně (mm)	tloušťka na prstu (mm)	tloušťka manžety (mm)
S	240	80±10	3.5±0.3	0.07±0.01	0.10±0.01	>0.04
M	240	95±10	3.8±0.3	0.07±0.01	0.10±0.01	>0.04
L	240	110±10	4.2±0.3	0.07±0.01	0.10±0.01	>0.04
XL	240	>110	4.5±0.3	0.07±0.01	0.10±0.01	>0.04